




Neb:O

手動ポンプ式
コンパクト鼻水吸引器

取扱説明書

保証書付き

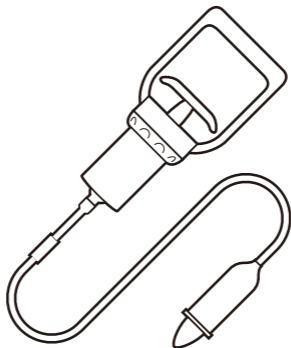


このたびは「手動ポンプ式コンパクト鼻水吸引器」をお買い上げ頂きまして、まことにありがとうございます。

この製品を安全に正しく使用して頂くために、お使いになる前にこの取扱説明書をよくお読み頂き、十分に理解してお使いください。


お読みになったあとも、手元におき大切に保管してください。

特徴

- 携帯に便利なコンパクトサイズ。
- ポンプを引くだけ。ちからがいらない簡単操作。
- ノズルは柔らかなシリコン製。お子様の鼻腔を傷付けません。
- お子様を怖がらせない、周りにも聞こえない静音設計。
- クリーニングOKで衛生的。

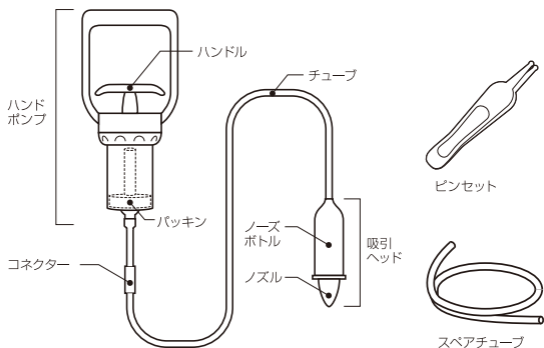

使い方

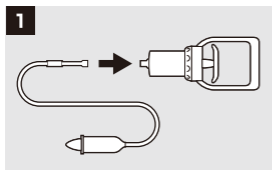


吸引ヘッドとハンドポンプにチューブをつなぎます。空気漏れが無いかご確認ください。



お子様の鼻孔に吸引ヘッドを斜めに当ててください。

※寝かせた状態、座らせた状態のどちらでも使用可能です。

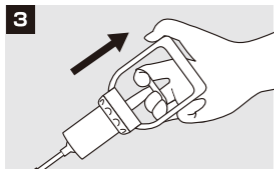

ハンドポンプのハンドルを引いてください。鼻水の状態・量に応じて2～3回繰り返してください。鼻水はヘッドのノーズボトルに溜まります。



使用後はヘッドのノズルとノーズボトルを分解し、強めの流水またはぬるま湯で洗ってください。

- 本商品を初めてご使用になる前に、吸引ヘッドのノーズボトルとノズルを取り外し洗浄し、そのあと熱湯または蒸気、薬液消毒を行ってください。
- 使用後は吸引ヘッドをチューブから取り外し、ノーズボトルとノズルを分解し、強めの流水またはぬるま湯で洗浄し、消毒を行ってください。
- ※チューブを取り外す際は、根元をつまみ、回すように引っ張ると取り外ししやすいです。
- ※流水で取りきれない汚れ等は付属ピンセットでとりのぞいてください。
- ※お客様の手の届かないところで乾燥・保管してください。
- ※ハンドポンプは必要な場合以外、洗浄しないでください。

ポンプ内部のパッキンの動きが悪くなる場合があります。パッキンの動きが悪い際は、ポンプ内壁にサラダ油等を少量塗布してください。

使用上のご注意

- 鼻の中が化膿していたり傷がある場合はご使用にならないでください。
- 急激に無理な力で吸引すると、鼻の粘膜に傷がつき、鼻血の原因になります。
- 吸引ヘッドのノーズボトルを真下に向けてご使用にならないでください。ハンドポンプ側に鼻水が吸い込まれることがあります。
- 鼻水吸引の用途以外のご使用はおやめください。
- 直射日光・高温多湿の場所を避け、清潔な所に保管してください。
- お客様の手の届かない所に保管してください。

製品仕様

商品名: 手動ポンプ式コンパクト鼻水吸引器

数量: 1

材質: ポリプロピレン、シリコンゴム、TPE

製造国: 中国

部 品	煮沸	薬液
ノズル	○	○
ノーズボトル	○	○
チューブ	○	○
コネクター	×	×
ハンドポンプ	×	×